


# NEBULISEUR C900

# OMRON

*/ Idéa! à  
domicile /*

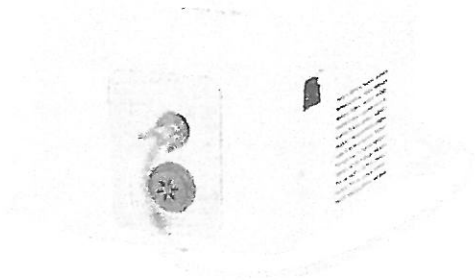

Chers Clients,

Certaines remontées clients font état de problème de surchauffe entraînant des disfonctionnements et une panne de l'appareil quand le C900 est utilisé avec des kits de nébulisation autre que les kits de nébulisation OMRON.

Si le C900 est utilisé avec des kits génériques autres que les kits OMRON, le nébuliseur doit générer des pressions plus élevées pour fonctionner correctement ce qui entraîne ce problème de surchauffe.

La garantie de 3 ans ne peut s'appliquer si le nébuliseur C900 n'a pas été utilisé avec le kit de nébulisation OMRON prévu à cet effet.

Pour des questions de sécurité, nous vous demandons de respecter les préconisations d'OMRON et de ne proposer à la vente avec les C900 que les kits de nébulisation OMRON.

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre disposition pour tout besoin d'information complémentaire,