

MODÈLE	MIO-CARE			
VERSION	BEAUTY (35 PROGRAMMES)			
<p style="text-align: center;"><b>CONTENU DU KIT MIO-CARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Électrothérapie TENS/EMS/FES avec un affichage graphique</li> <li>• 2 câbles de connexion aux électrodes avec 4 dérivations (8 électrodes connectables).</li> <li>• électrodes adhésives pregelées</li> <li>• batterie interne Ni-Mh rechargeable avec une nouvelle technologie LL (long lasting - basse autodechargée).</li> <li>• chargeur</li> <li>• clip de ceinture</li> <li>• manuel d'utilisation et manuel de positionnement des électrodes</li> <li>• sac de transport</li> </ul>				
<p style="text-align: center;"><b>PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Électrothérapie à 2 canaux indépendants avec la possibilité de relier jusqu'à 8 électrodes ;</li> <li>• générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui court du pôle positif au négatif est égale et constante. On évite ainsi le désagréable effet thermique de polarisation possible avec un générateur à impulsion non compensée ;</li> <li>• clavier digital avec des commandes simples et intuitives;</li> <li>• fonctionnement asynchrone des canaux de stimulation (lipolyse).</li> <li>• instructions sur le programme en cours et le temps de traitement restant fournis directement sur l'écran ;</li> <li>• fonctionnement avec batterie interne rechargeable (extractible);</li> <li>• écran rétro-éclairé ;</li> <li>• Intensité maximale de 200 mApp;</li> <li>• dispositif médical certifié CE0476.</li> </ul>				
<p style="text-align: center;"><b>FORME D'IMPULSION ET NOMBRE DE PROGRAMMES</b></p> <p>Beaucoup de dispositifs en vente ont de nombreux programmes, mais il est important que le consommateur fasse la différence entre « programme » et « traitement ».</p> <p>Par exemple, le programme TENS conventionnel peut être appliqué sur 50 parties différentes du corps mais il s'agit toujours du même programme. Donc 1 programme et 50 applications.</p> <p>Les programmes sont différents quand les variables suivantes sont différentes: largeur d'impulsion, fréquence de stimulation, durée de stimulation, temps de travail et temps de repos. Le TENS conventionnel, par exemple, fonctionne avec une gamme d'impulsions de 1 Hz à 150 Hz, une amplitude maximale des impulsions de 50/70 µs et une durée de 40 minutes. Le TENS endorphinique fonctionne avec une gamme d'impulsions de 1 Hz à 4 Hz, une amplitude maximale des impulsions de 250/300 µs et une durée de 20 minutes. Les objectifs sont différents: dans le premier cas une diminution de la douleur immédiate et peu durable ; dans le deuxième cas, une diminution de la douleur retardée et plus durable.</p> <p>Donc la chose la plus importante n'est pas le nombre de programmes, c'est la forme d'impulsion utilisée pour atteindre les objectifs.</p> <p><b>C'EST EXACTEMENT LE BUT DE MIO-CARE TENS ET DE NOTRE ENTREPRISE.</b></p>				
<b>20 Programmes SANTE</b>		<b>15 Programmes Beauté</b>		
Tens conventionnel (rapide)	Raffermissment des membres supérieurs et tronc			
Tens endorphinique (retardé)	Raffermissment des membres inférieurs			
Tens puissant	Tonification des membres supérieurs et tronc			
Anti-inflammatoire	Tonification des membres inférieurs			
Cervicalgie	Définition des membres supérieurs et tronc			
Lombalgie/lombosciatalgie	Définition des membres inférieurs			
Entorse	Adipostress			
Vascularisation	Microlifting			
Décontractant	Lipolyse abdomen			

Hématome	Lipolyse cuisses
Prévention atrophie	Lipolyse fesses et hanches
Amyotrophie	Lipolyse bras
Douleur main poignet	Élasticité des tissus
Stimulation plantaire	Capillarisation
Epicondylite	Jambes lourdes
Epitrochléite	
Périarthrite	
Micro-courant	
Incontinence Effort	
Incontinence Vésicale	
<b>Dimensions:</b> 135X 61 X 25 mm	